


# HANAULUX®

## blue 130/100/90

Ersatzteilliste

Spare part list

56 351 027

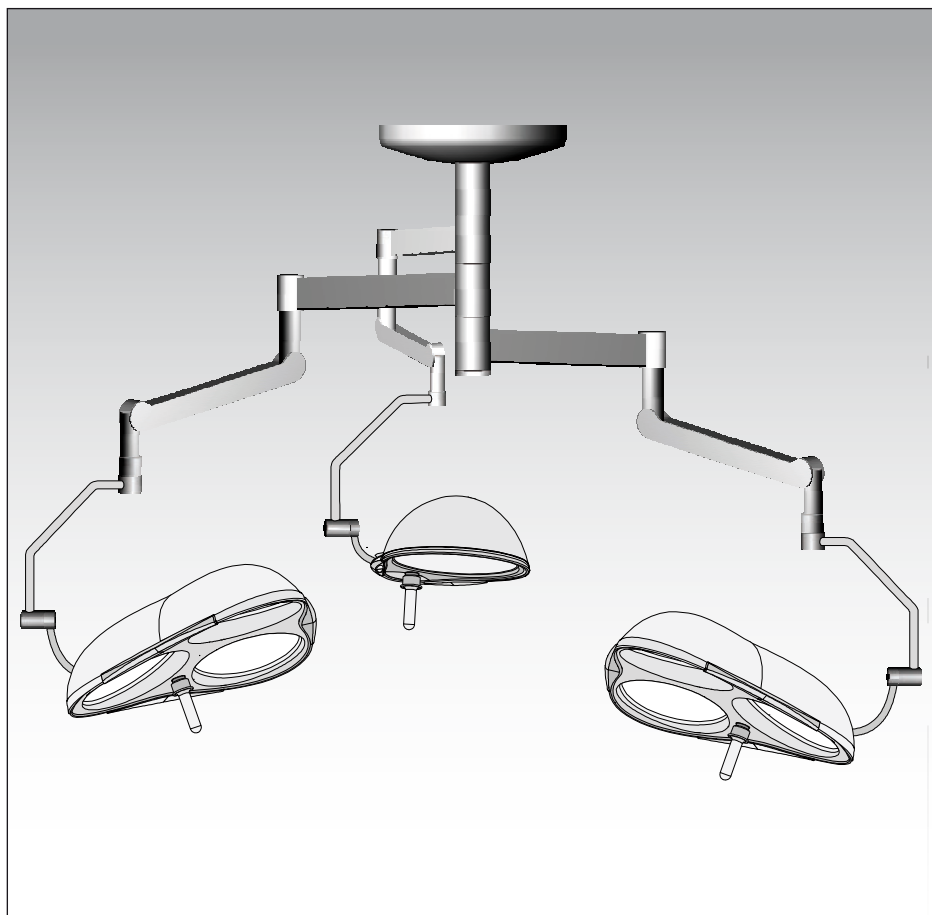

## Inhaltsverzeichnis

<b>1 Versionen</b> .....	<b>3</b>
1.1 Ergo Disk Version .....	3
1.2 Komfort Version .....	3
1.3 Niedrige Raumhöhe NRH .....	3
<b>2 Leuchtenkörper</b> .....	<b>4</b>
2.1 Leuchtenkörper <i>Blue 90</i> .....	4
2.2 Leuchtenkörper <i>Blue 100</i> .....	5
2.3 Leuchtenkörper <i>Blue 130</i> .....	6
<b>3 Blue 130 TV + Dimmer</b> .....	<b>7</b>
3.1 Komfort + Komfort Dimmer .....	7
3.2 Komfort TV / Komfort TV + Dimmer .....	7
3.3 Ergo disk Dimmer .....	8
3.4 Ergo disk TV + Dimmer .....	8
<b>4 Tragarmsystem</b> .....	<b>9</b>
4.1 Ergo disk Duo und Trio .....	9
4.2 Komfort Single, Duo, Trio .....	10
<b>5 Federarme / Spring arms</b> .....	<b>11</b>
5.1 Federarm Komfort .....	11
5.2 Federarm NRH (niedrige Raumhöhe) .....	11
5.3 Federarm HANAUVISION SAT .....	11
<b>6 Ersatzteilliste</b> .....	<b>12</b>


## Content

<b>1 Versions</b> .....	<b>3</b>
1.1 Ergo disk version .....	3
1.2 Comfort version .....	3
1.3 Low ceiling heigth LCH .....	3
<b>2 Light head</b> .....	<b>4</b>
2.1 Light head <i>Blue 90</i> .....	4
2.2 Light head <i>Blue 100</i> .....	5
2.3 Light head <i>Blue 130</i> .....	6
<b>3 Blue 130 TV</b> .....	<b>7</b>
3.1 TV comfort + Comfort dimmer .....	7
3.2 Comfort TV / Comfort TV + dimmer .....	7
3.3 Ergo disk dimmer .....	8
3.4 Ergo disk TV + dimmer .....	8
<b>4 Support arm system</b> .....	<b>9</b>
4.1 Ergo disk Duo and Trio .....	9
4.2 Comfort Single, Duo, Trio .....	10
<b>5 Spring arms</b> .....	<b>11</b>
5.1 Spring arm Comfort .....	11
5.2 Spring arm LCH (low ceiling heigth) .....	11
5.3 Spring arm HANAUVISION SAT .....	11
<b>6 Spare part list</b> .....	<b>12</b>

# 1 Versionen / Versions


## 1.1 Ergo Disk Version / Ergo disk version

Abb. / Fig 1

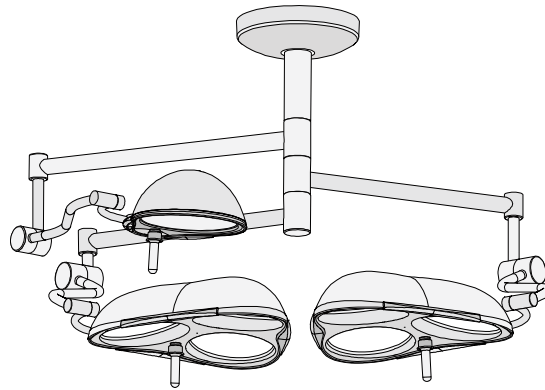


## 1.2 Komfort Version / Comfort version

Abb. / Fig 2

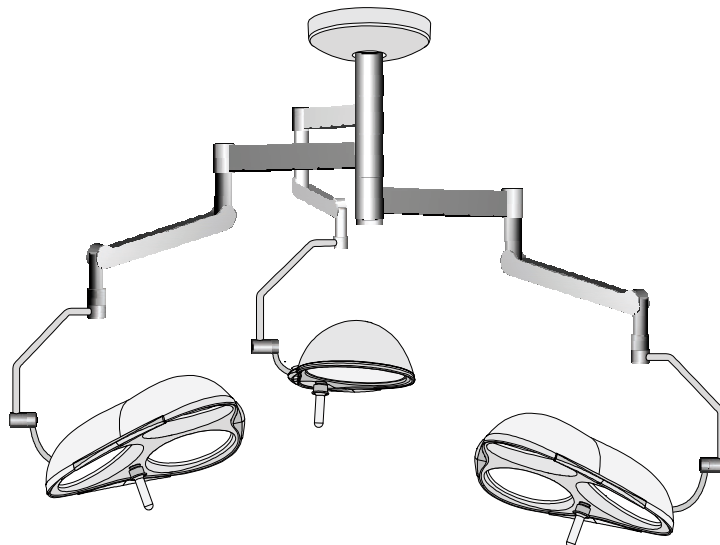

## 1.3 Niedrige Raumhöhe NRH / Low ceiling height LCH



Abb. / Fig 3

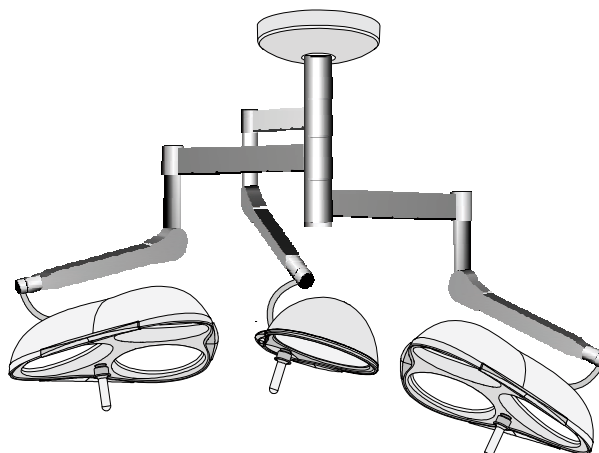

## 2 Leuchtenkörper / light head

### 2.1 Leuchtenkörper *Blue 90* / light head *Blue 90*

Abb. / Fig 4

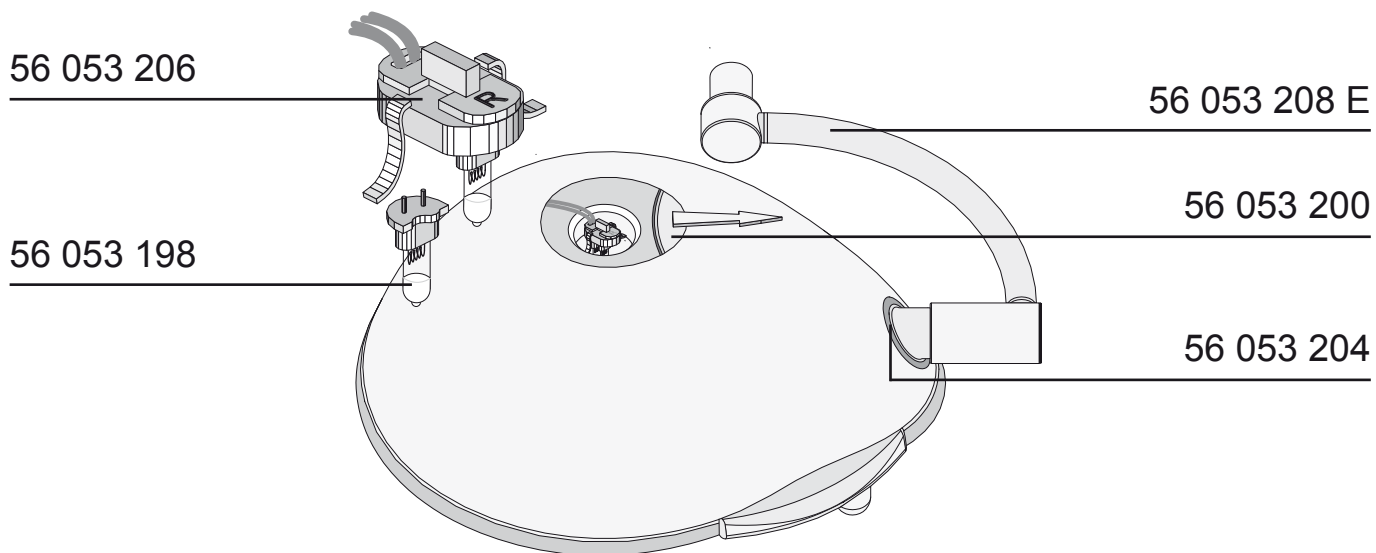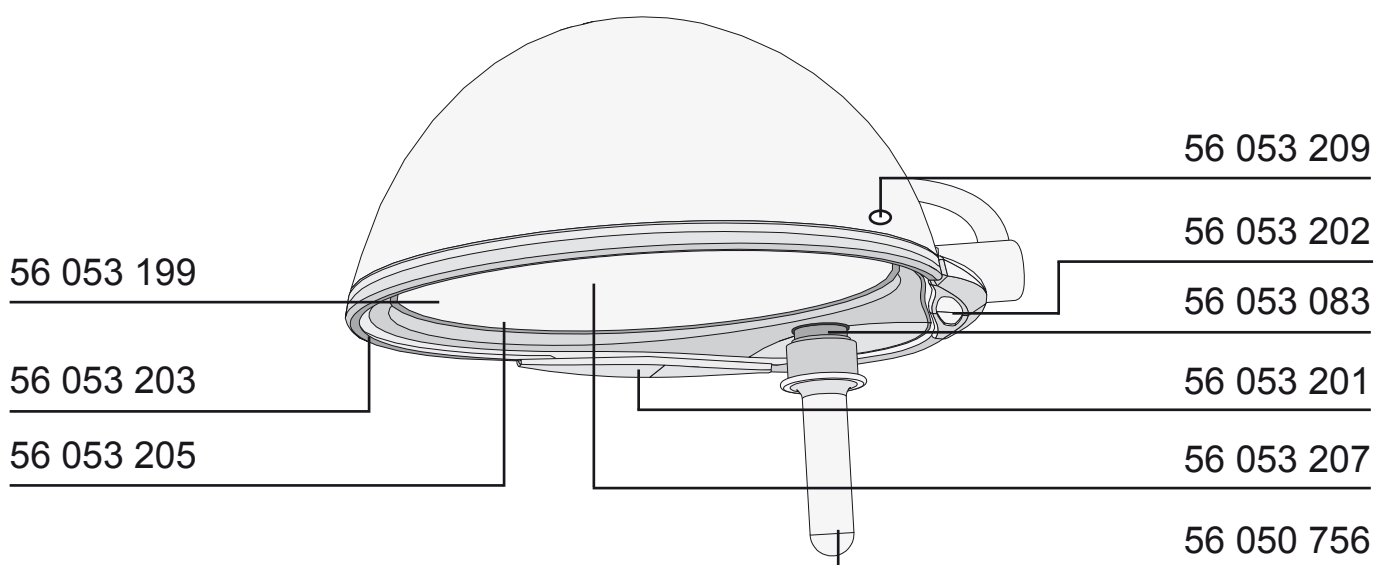


E = Ergo Disk

## 2 Leuchtenkörper / light head

### 2.2 Leuchtenkörper *Blue 100* / light head *Blue 100*



Abb. / Fig 5

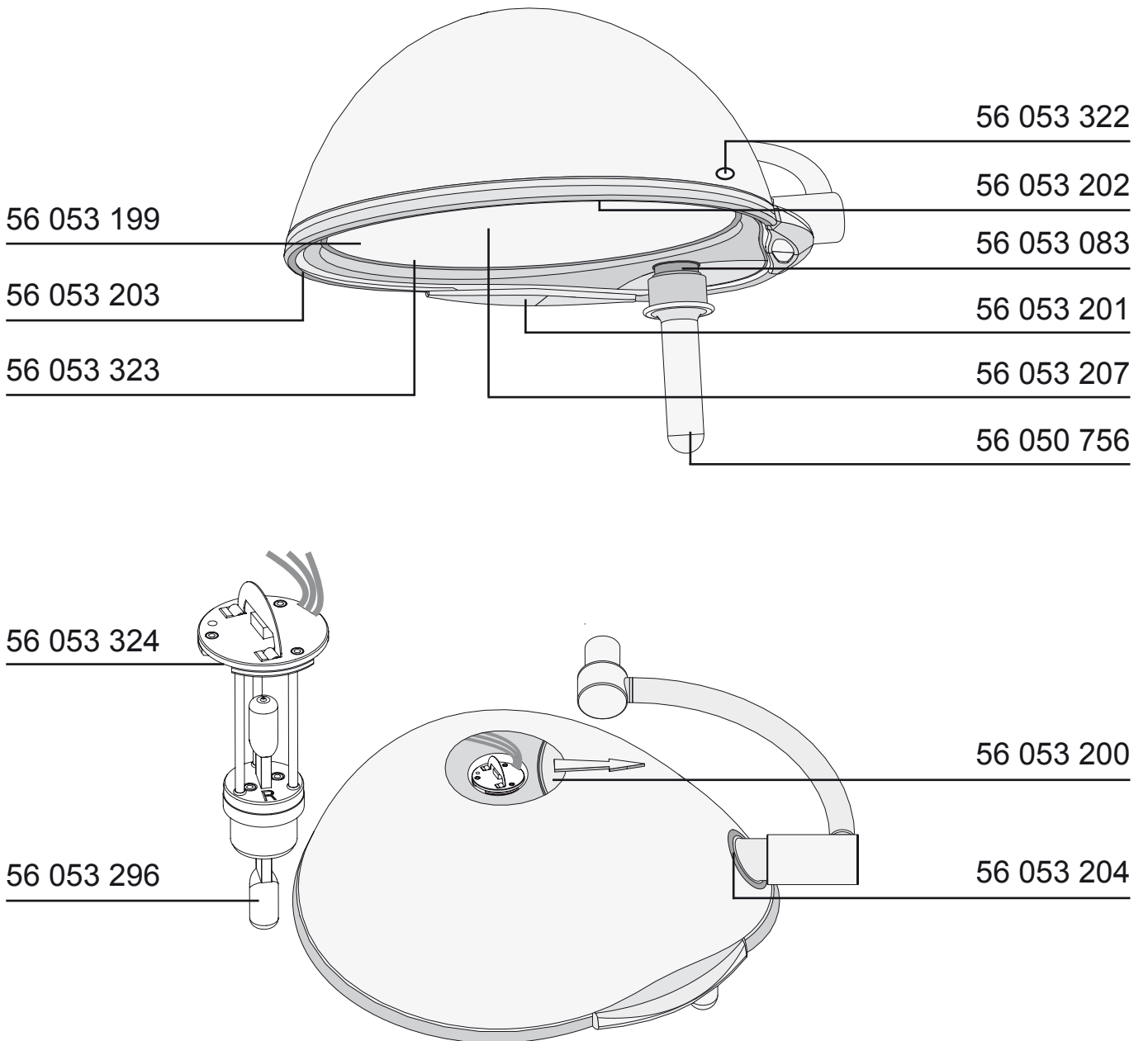

## 2 Leuchtenkörper / light head

### 2.3 Leuchtenkörper *Blue 130 Ergo Disk + Komfort (Standard)* / Light head *Blue 130 ergo disk + Comfort (standard)*

Abb. / Fig 6

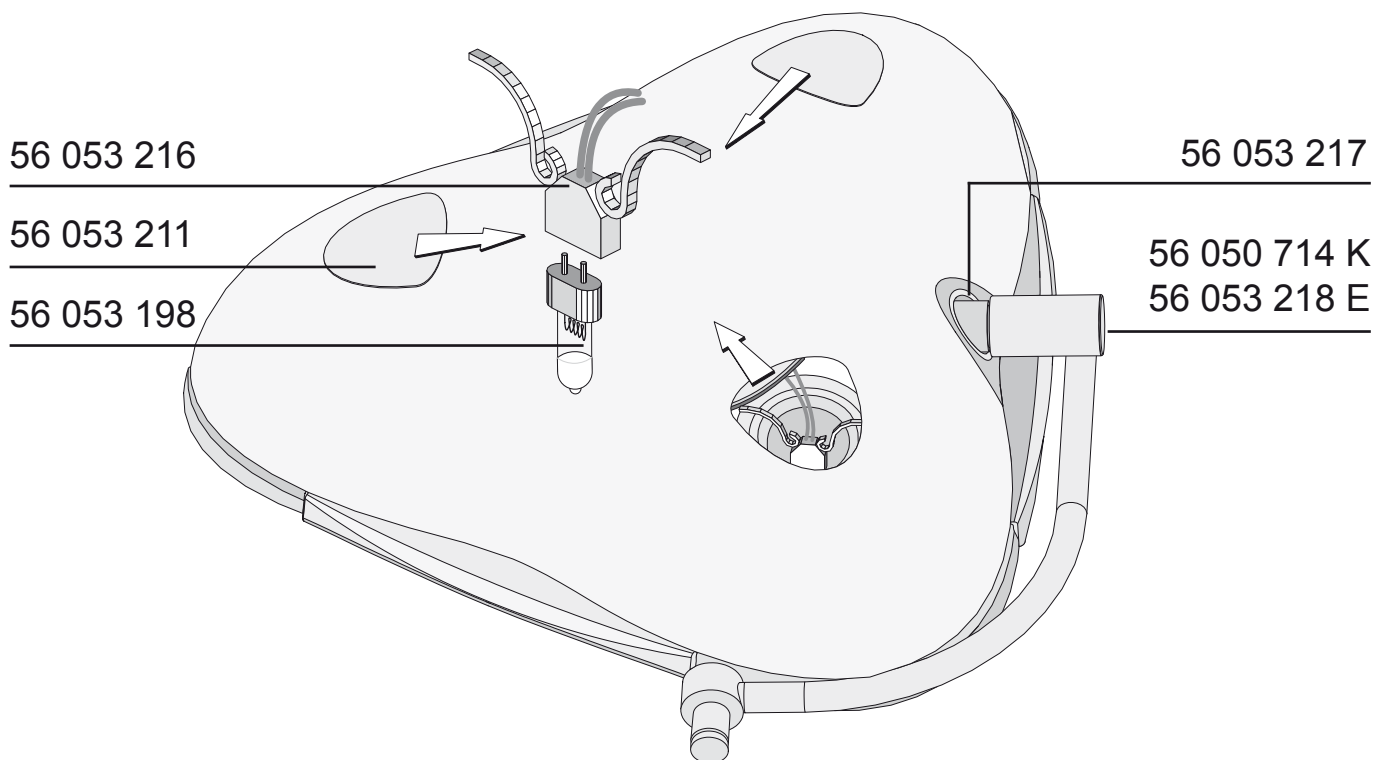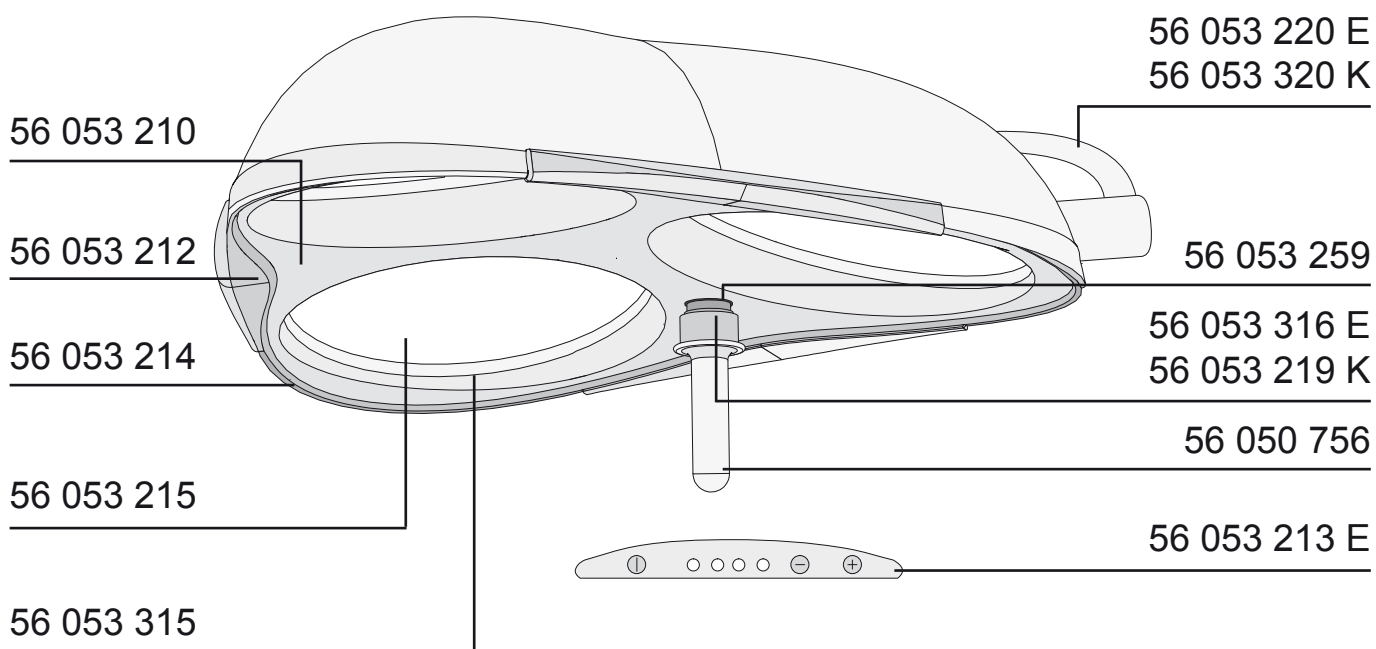


E = Ergo Disk  
K = Komfort / Comfort

### 3 Blue 130 TV + Dimmer / Blue 130 TV + dimmer


#### 3.1 Komfort + Komfort Dimmer / + Comfort + Comfort Dimmer

Abb. / Fig 7

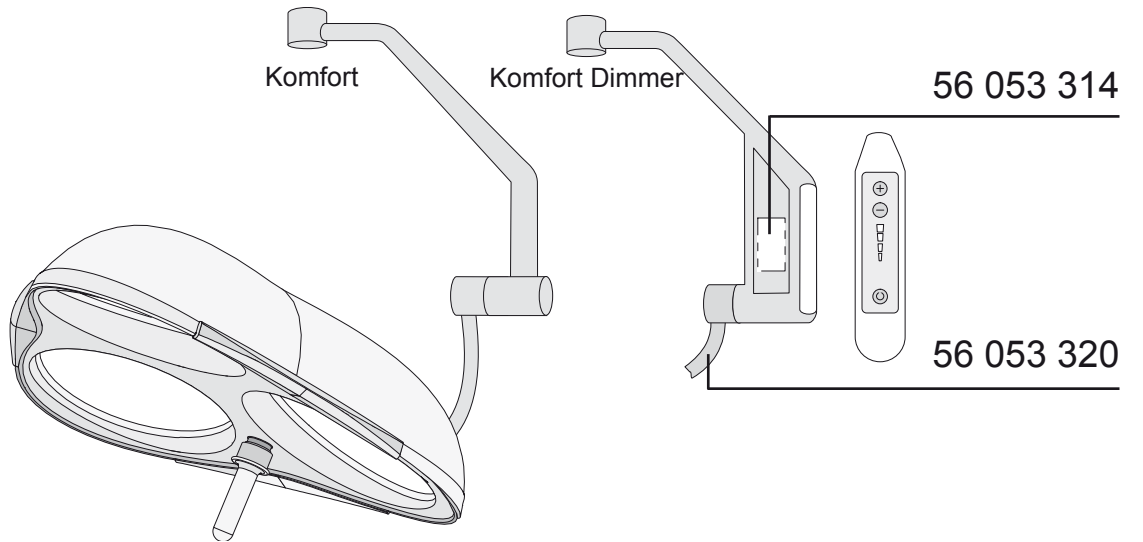

#### 3.2 Komfort TV / Komfort TV + Dimmer / Comfort TV / Comfort TV + Dimmer


Abb. / Fig 8

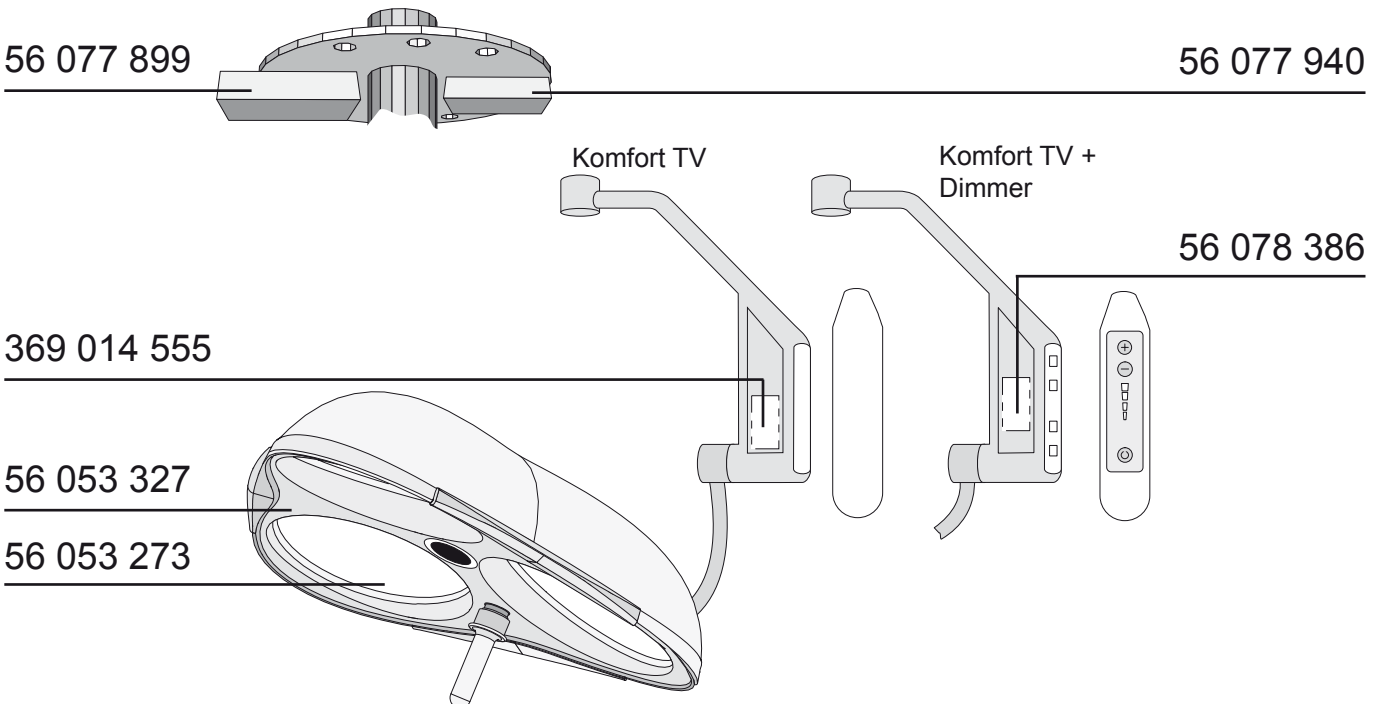


### 3 Blue 130 TV / Blue 130 TV

#### 3.3 Ergo disk Dimmer / Ergo disk dimmer

Abb. / Fig 9

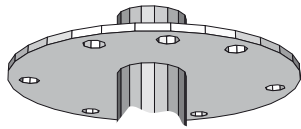

56 053 295

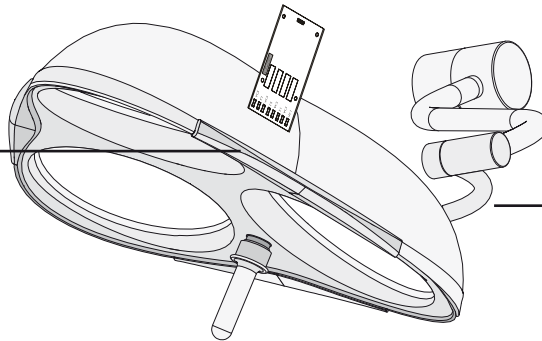


56 053 321

#### 3.4 Ergo disk TV + Dimmer / Ergo disk TV + Dimmer


Abb. / Fig 10

56 077 899

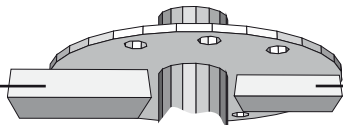

56 077 940

56 053 298

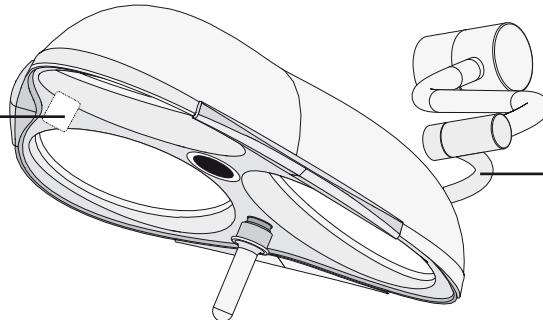


56 053 319



## 4 Tragarmsystem / Support arm system

### 4.1 Ergo disk Duo und Trio / Ergo disk Duo and Trio

Abb. / Fig 11

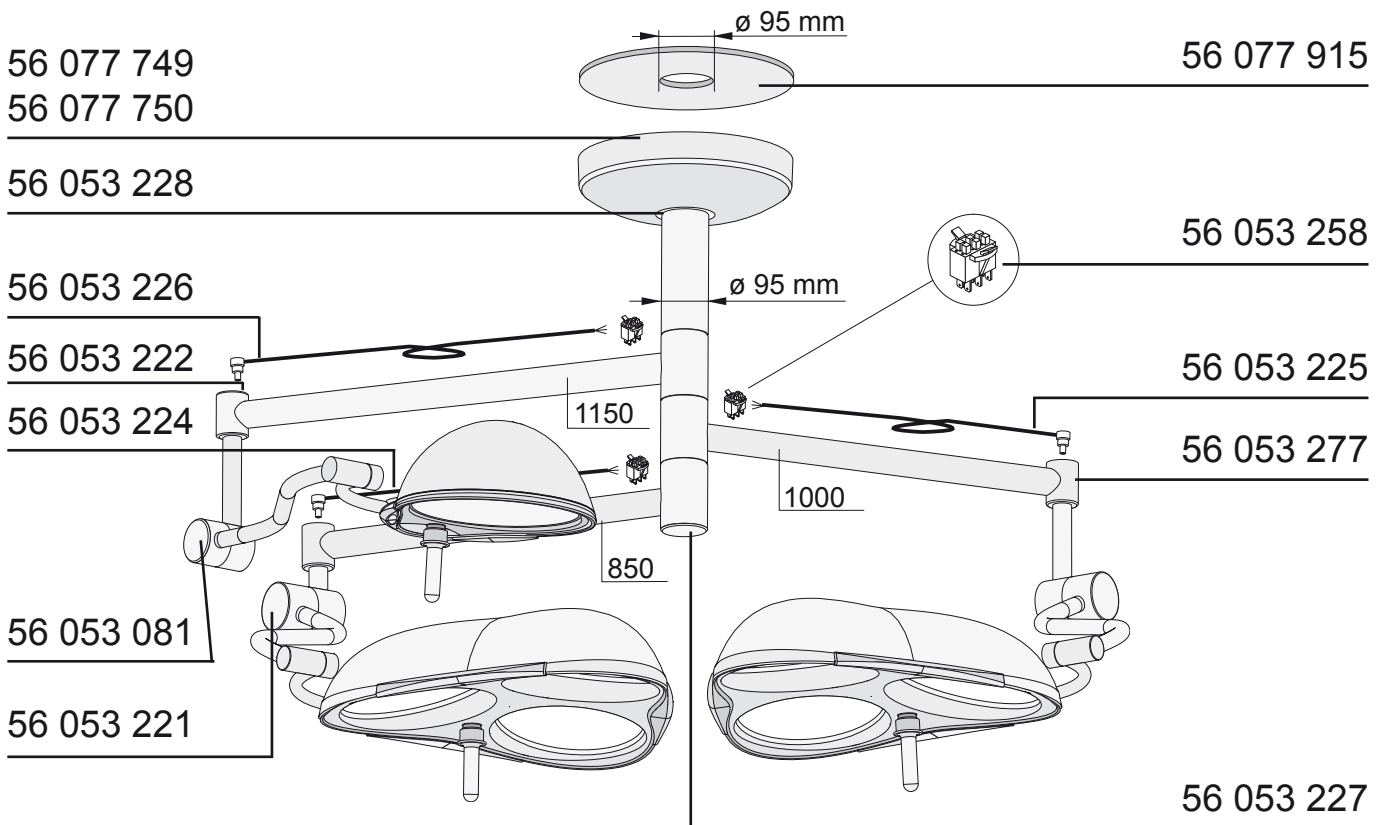


56 053 260  
ohne Abb. / without Fig.

NRH = Niedrige Raumhöhe / Low ceiling height (LCH)

## 4 Tragarmsystem / Support arm system

### 4.2 Komfort Single, Duo, Trio / Comfort version Single, Duo, Trio


Abb. / Fig 12

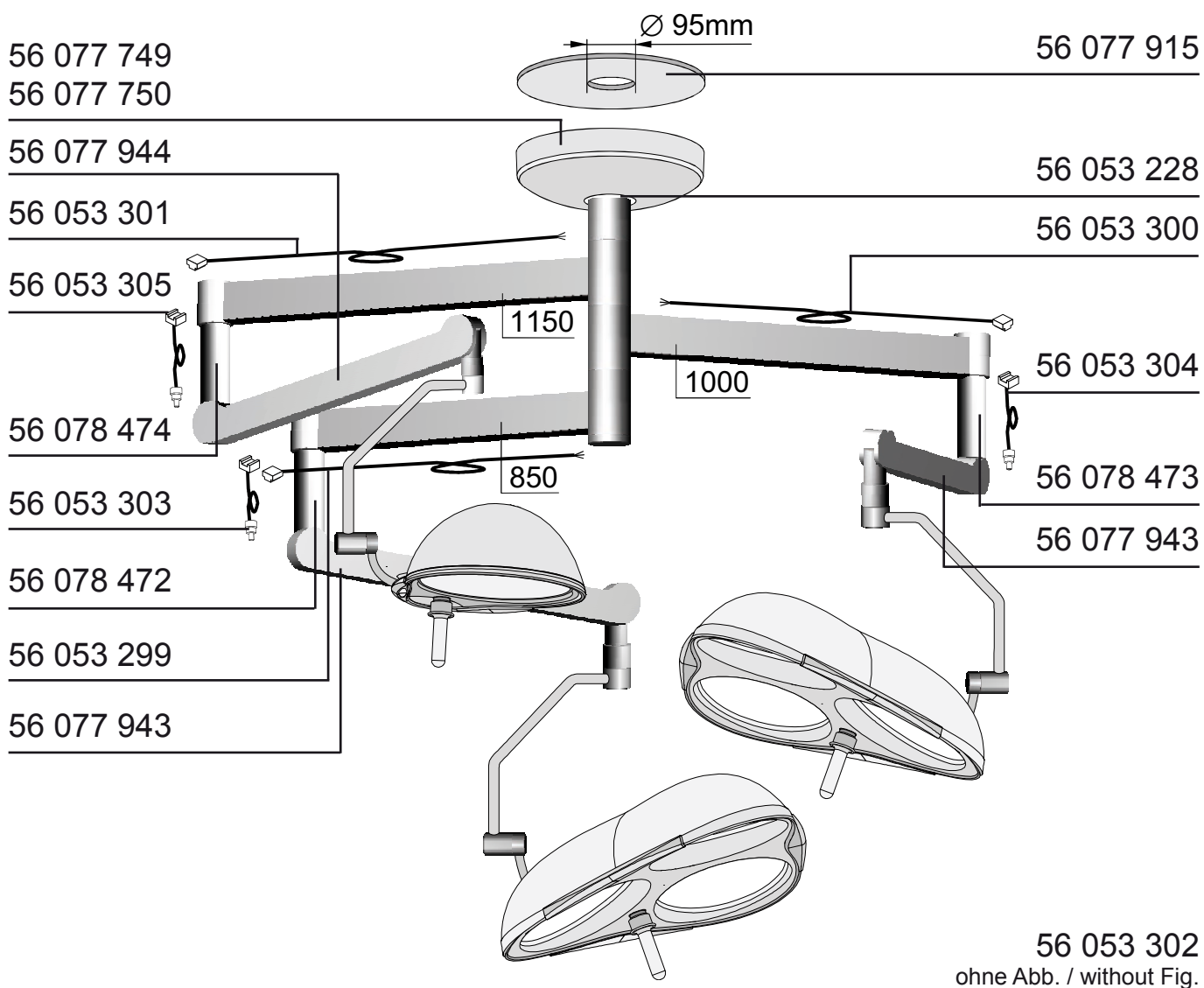


## 5 Federarme / Spring arms

### 5.1 Federarm Komfort / Spring arm Comfort

Abb. / Fig 13

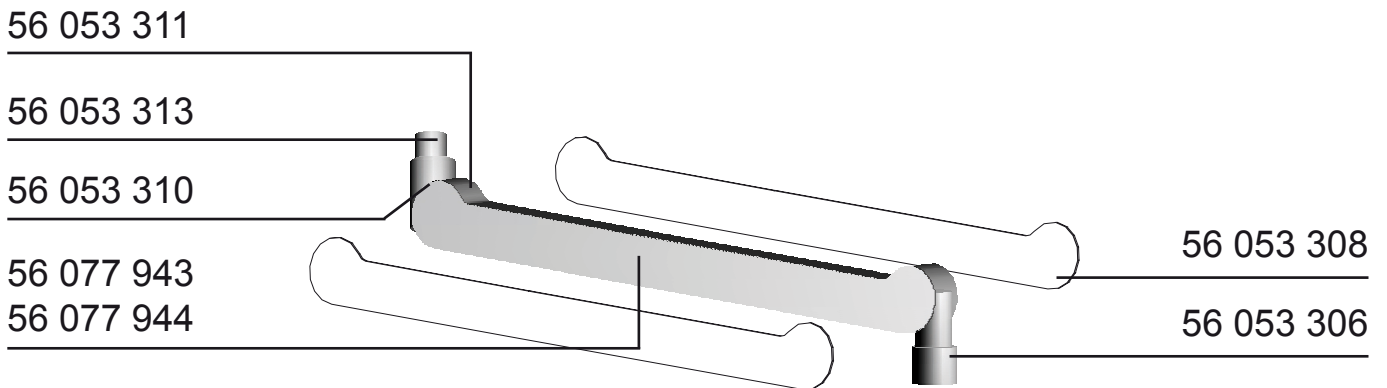


### 5.2 Federarm NRH (niedrige Raumhöhe) / Spring arm LCH (low ceiling height)

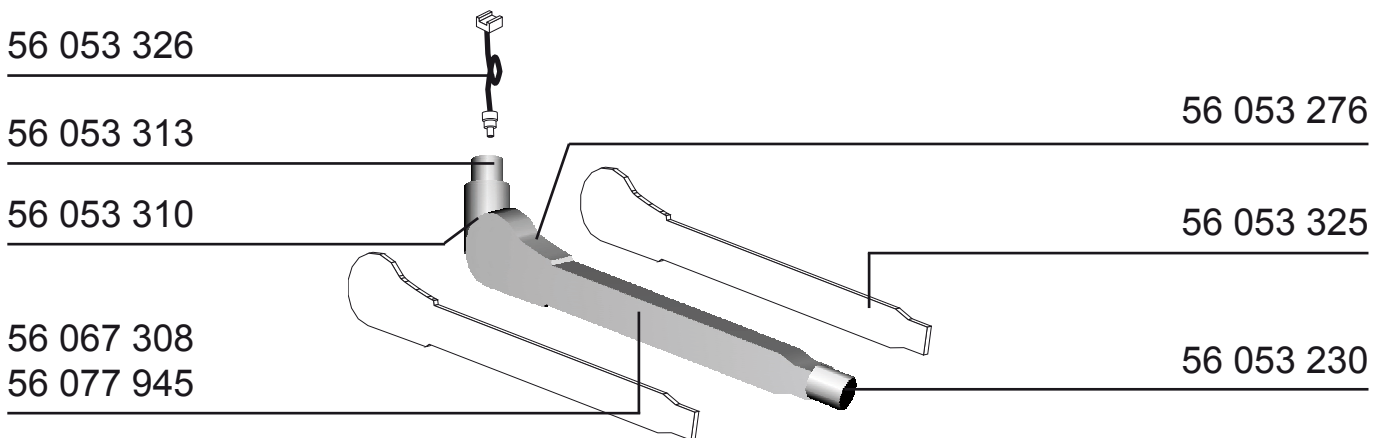Abb. /  
Fig 14

### 5.3 Federarm HANAUVISION SAT / Spring arm HANAUVISION SAT

Abb. / Fig 15

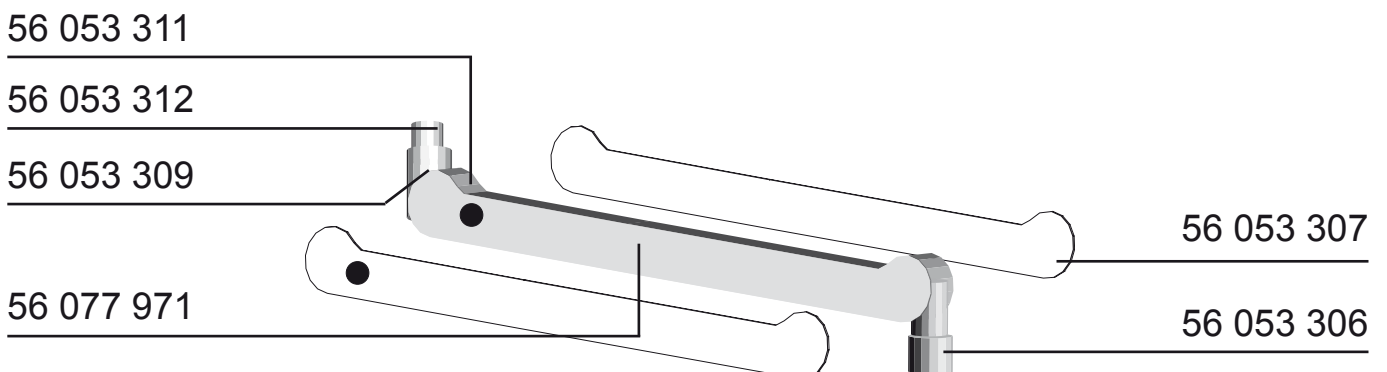

## 6 Ersatzteilliste / Spare part list

Ident.-Nr.	Bezeichnung	Description	Verwendung/used in blue			Abb. / Fig.
			90	100	130	
56050714	Deckel für Viertelbügel, 2 Stck (Blue 130 Komfort Version)	cover for quarter bracket, 2 off (Blue 130 comfort-version)			X	6
56050756	Sterilisierbarer Handgriff, Kunststoff, 3 Stück	sterilisable handle, plastic, 3 off	X	X	X	4 / 5 / 6
56053081	Blue 90 Abdeckkappen für Gewichtsausgleich, 2Stück	Blue 80 covers for counter balance, 2 off	X			11
56053083	Blue 80 / 90 / 100 Handgriffadapter, vollständig	Blue 80/90/100 adapter for handle complete	X	X		4 / 5
56053158	Abdeckkappe für Z-Achse, Single Tragarmsystem	cover for axle single carry-system	X	X	X	---
56053198	Blue 90 / 130 Ersatzhalogenlampe, komplett	Blue 90/130 halogen bulb complete	X		X	4 / 6
56053199	Blue 90 / 100 Frontscheibe, komplett	Blue 90/130 protective disc, complete	X	X		4 / 5
56053200	Blue 90 / 100, Deckel für Lampenwechsel	Blue 90/100 cover for bulb exchange	X	X		4 / 5
56053201	Blue 90 / 100 Griffleiste	Blue 90/100 rail	X	X		4 / 5
56053202	Blue 90 / 100, Griffleiste mit Tastatur, vollständig.	Blue 90/100 rail with touchpanel complete	X	X		4 / 5
56053203	Blue 90 / 100, Verbindungselement, vollständig (links + rechts)	Blue 90/100 joining element complete (left + right)	X	X		4 / 5
56053204	Blue 90 / 100, Dichtungsmanschette, vollständig	Blue 90/100 packing, complete	X	X		4 / 5
56053205	Blue 90, Reflektorsystem, vollständig	Blue 90, reflector system, complete	X			4
56053206	Blue 90, Doppellampenfassung	Blue 90, double halogenbulb socket	X			4
56053207	Blue 90 / 100, Filterscheibe, vollständig	Blue 90/100, filter disc complete	X	X		4 / 5
56053208	Blue 90, Viertelbügel, komplett (Ergodisc)	Blue 90, quarter bracket complete (ergodisc)	X			4
56053209	Blue 90, Umschaltelektronik	Blue 90, reversing switch	X			4
56053210	Blue 130, Frontscheibe	Blue 130 protective disc			X	6

## 6 Ersatzteilliste / Spare part list

Ident.-Nr.	Bezeichnung	Description	Verwendung/used in blue			Abb. / Fig.
			90	100	130	
56053211	Blue 130, Deckel für Lampenwechsel	Blue 130, cover for bulb exchange			X	6
56053212	Blue 130, Griffleiste 3 Stück	Blue 130, rails 3 off			X	6
56053213	Blue 130, Griffleiste mit Tastatur, 1Stück	Blue 130, rail with touch panel, 1 off			X	6
56053214	Blue 130, Verbindungselement, vollständig, 3 Stück	Blue 130, joining element complete, 3 off			X	6
56053215	Blue 130, Reflektorsystem, vollständig	Blue 130, reflector system, complete			X	6
56053216	Blue 130, Lampenfassung	Blue 130, bulb socket			X	6
56053217	Blue 130, Dichtmanschette, komplett	Blue 130, packing, complete			X	6
56053218	Blue 130, Deckel-Set für Leuchtenkörper	Blue 130, cover set for lighthouse			X	6
56053219	Blue 130, Handgriffaufnahme, komplett	Blue 130, handle fixture, complete			X	6
56053220	Blue 130, Viertelbügel, komplett, Basis / Dimmer (Ergodisc)	Blue 130, quarter bracket, complete basic / dimmer (ergodisc)			X	6
56053221	Blue 130, Abdeckkappen, Gewichts- ausgleich, bedruckt / unbedruckt	Blue 130, cover, counterbalance, printed/unprinted			X	11
56053222	Blue 90 / 100 / 130, Deckel für Ausleger	Blue 90/100/130 cover for extension arm	X	X	X	11
56053224	Blue 90 / 130, Verdrahtungseinheit, Ausleger 850 (Ergodisc)	Blue 90/130, wiring complete extension arm 850 (ergodisc)	X		X	11
56053225	Blue 90 / 130, Verdrahtungseinheit, Ausleger 1000 (Ergodisc)	Blue 90/130 wiring complete, extension arm 1000 (ergodisc)	X		X	11
56053226	Blue 90 / 130, Verdrahtungseinheit, Ausleger 1150 (Ergodisc)	Blue 90/130 wiring complete, extension arm 1150 (ergodisc)	X		X	11
56053227	Blue 90 / 100 / 130, Abdeckkappe für Z-Achse (Single, Duo, Trio)	Blue 90/100/130 cover for central-axle (single, duo, trio)	X	X	X	11
56053228	Klemmring für Flanschrohr, komplett	clamping ring for flange tube, complete	X	X	X	11 / 12
56053230	Sicherungshülse + Abdeckkappe für Federarm gerade / Typ 1	safety sleeve + cover for straight spring arm / type 1	X	X	X	14

## 6 Ersatzteilliste / Spare part list

Ident.-Nr.	Bezeichnung	Description	Verwendung/used in blue			Abb. / Fig.
			90	100	130	
56053258	Blue 90 / 100 / 130, Stromabnehmer, komplett	Blue 90/100/130 ,collector complete	X	X	X	6 / 11
56053259	Blue 130, Dichtung für Handgriffaufnahme	Blue 130, washer for handle fixture			X	6
56053260	Blue 90 / 130, (Ergodisk), Schraubensatz	Blue 190/ 130, (ergodisc) screw set	X		X	---
56053273	Blue 130 TV, Reflektorsystem, vollständig	Blue 130 reflector system complete			X	6
56053276	Blue 90 / 100 / 130 Federarm, (NRH), 2 Abdeck-Bleche + Kappen	Blue 90 /100/130 springarm (LCH) 2 cover sheets + caps	X	X	X	14
56053277	Blue 90 / 130, (Ergodisc), Lagerbuchsen-Set für Ausleger	Blue 90/130 (ergodisc) bearing tube-set for extension arm	X		X	11
56053295	Blue 130, Dimmermodul für Leuchtenkörper 56 078 056 (Ergodisc)	Blue 130, dimmermodul for lighthouse 56078056 (ergodisc)			X	9
56053296	Blue 100, Ersatz-Leuchtmittel	Blue 100 halogen bulb		X		5
56053298	Blue 130 TV, Sender im Leuchtenkörper	Blue 130 TV transmitter in lighthouse			X	10
56053299	Blue 90 /130 /100, (Komfort), Verdrahtungseinheit für Ausleger 850	Blue 90/100/130 (comfort) wiring for extension arm 850	X	X	X	12
56053300	Blue 90 /100 / 130, (Komfort), Verdrahtungseinheit für Ausleger1000	Blue 90/100/130 (comfort) wiring for extension arm 1000	X	X	X	12
56053301	Blue 90 /100 / 130, (Komfort), Verdrahtungseinheit für Ausleger 1150	Blue 90/100/130 (comfort) wiring for extension arm 1150	X	X	X	12
56053302	Blue 90 / 100 / 130, (Komfort), Schraubensatz	Blue 90/100/130 (comfort) screw set	X	X	X	---
56053303	Blue 90 / 100 / 130, (Komfort), kurze Verdrahtungseinheit im Distanzstück	Blue 90/100/130 (comfort) short wiring in spacer	X	X	X	12
56053304	Blue 90/100/130, (Komfort), mittlere Verdrahtungseinheit im Distanzstück	Blue 90/100/130 (comfort) middle wiring in spacer	X	X	X	12
56053305	Blue 90 / 100 / 130, (Komfort), lange Verdrahtungseinheit im Distanzstück	Blue 90/100/130 (comfort) long wiring in spacer	X	X	X	12
56053306	Blue 90/100/130, (Komf.),Federarm: Sicherheitshülse+Segment+Schr.	Blue 90/100/130 (comfort)spring arm safety sleeve +segment+screw	X	X	X	13 / 15
56053307	HANAUVISION - Sat Version, Federarm-Halbschalen, lang	HANAUVISION -sat-version spring arm covers , long	HANAUVISION, Sat			15

## 6 Ersatzteilliste / Spare part list

Ident.-Nr.	Bezeichnung	Description	Verwendung/used in blue			Abb. / Fig.
			90	100	130	
56053308	Blue 90 / 100 / 130, (Komfort), Federarm-Halbschalen, lang	Blue 90/100/130 (comfort) spring arm covers, long	X	X	X	6 / 13 / 14
56053309	HANAUVISION - Sat Version, Federarm-Abdeckkappen f. Gelenk (2Paar)	HANAUVISION -sat-version spring arm covers f.joint (2 off)	HANAUVISION, Sat			15
56053310	Blue 90 / 100 / 130, (Komfort), Federarm-Abdeckkappen f. Gelenk (2Paar)	Blue 90/100/130 (comfort) spring arm covers for joint (2 off)	X	X	X	13 / 14
56053311	Blue 90 / 100 / 130, (Komfort), Federarm-Abdeckbleche, 4 Stück	Blue 90/100/130 (comfort) spring arm cover-sheets (4 off)	X	X	X	13 / 15
56053312	Blue (Komfort), Federarm TV Sat, Buchse mit Nadellager + Anschlag	Blue (comfort), spring arm TV sat bearing bush + stop	HANAUVISION, Sat			15
56053313	Blue 90 / 130, (Komfort + NRH), Buchse mit Nadellager o. Anschlag	Blue 90/130 (comfort+LCH) control system in comfort bracket	X		X	13 / 14
56053314	Blue 130, (Komfort), Dimmer-Steuerung im Komfort-Bügel	Blue 130 (comfort) dimmer control system in comfort bracket			X	7
56053315	Blue 130, Filterscheibe Plus, vollständig	Blue 130, filter disc plus complete			X	6
56053316	Blue 130, Handgriffaufnahme Ergofocus, komplett	Blue 130 handle fixture ergofocus, complete			X	6
56053319	Blue 130 TV, Viertelbügel Ergodisc, komplett	Blue 130 TV, quarter bracket (ergodisc) complete			X	6 / 10
56053320	Blue 130 TV, Viertelbügel, komplett	Blue 130 TV, quarter bracket complete			X	7
56053321	Blue 130, Dimmer Viertelbügel, komplett	Blue 130 dimmer, quarter bracket complete			X	9
56053322	Blue 100, Umschaltelektronik im Leuchtenkörper	Blue 100, reversing switch in lighthouse		X		5
56053323	Blue 100, Reflektor-System	Blue 100 reflector system		X		5
56053324	Blue 100, Leuchtmittelhalter	Blue 100 bulb holder		X		5
56053325	Blue 90 / 100 / 130, (NRH), Federarm NRH + Halbschalen	Blue 90/100/130 (LCH) spring arm LCH + covers	X	X	X	14
56053326	Blue 90 / 100 / 130, (NRH), Federarm NRH Adapterleitung	Blue 90/100/130 (LCH) spring arm LCH adapter wiring	X	X	X	14
56053327	Blue 130 TV, Frontscheibe	Blue 130 TV, front disc			X	6
56067308	Blue 90 / 100, (NRH), Federarm NRH	Blue 90/ 100 (LCH) spring arm LCH	X		X	14

# 6 Ersatzteilliste / Spare part list

Ident.-Nr.	Bezeichnung	Description	Verwendung/used in blue			Abb. / Fig.
			90	100	130	
369014555	TV-Sender ohne Tastatur	TV-transmitter without touchpanel			X	8
56077749	Blue 90 / 100 / 130, Baldachin, flach	Blue 90/100/130 ceiling cover, flat	X	X	X	11 / 12
56077750	Blue 90 / 100 / 130, Baldachin, hoch	Blue 90/100/130 ceiling cover, high	X	X	X	11 / 12
56077899	TV - Empfänger	TV - receiver			X	7 / 8 / 10
56077915	Abdeckscheibe, flach 500 / 95 mm	coverdisc, flat 500/95 mm	X	X	X	11 / 12
56077940	Blue 130 TV, Dimmermodul	Blue 130 TV dimmermodul			X	8 / 10
56077943	Blue 130, Federarm	Blue 130 spring arm			X	12 / 13
56077944	Blue 90 / 100 Federarm	Blue 90/100 spring arm	X	X		12 / 13
56077945	Blue 130 Federarm NRH	Blue 130 spring arm LCH			X	12 / 14
56077971	HANAUVISION Sat, Federarm	HANAUVISION Sat, spring arm	HANAUVISION, Sat			15
56078386	TV Sender mit Tastatur	TV-transmitter with touchpanel			X	8
56078472	Blue 90 / 100 / 130, (Komfort), Distanzstück für Anbau-Pos. 1	Blue 90/100/130 (comfort) spacer tube for pos. 1	X	X	X	12
56078473	Blue 90 / 100 / 130, (Komfort), Distanzstück für Anbau-Pos. 2	Blue 90/100/130 (comfort) spacer tube for pos. 2	X	X	X	12
56078474	Blue 90 / 100, (Komfort), Distanzstück für Anbau-Pos. 3	Blue 90/100/130 (comfort) spacer tube for pos. 3	X	X		12





**MAQUET SA**  
Parc de Limère  
Avenue de la Pomme de Pin  
CS 10008 ARDON  
45074 ORLÉANS CEDEX 2  
FRANCE

Tel: +33 (0) 2 38 25 88 88  
Fax: +33 (0) 2 38 25 88 00  
Internet: [www.maquet-sa.fr](http://www.maquet-sa.fr)