

Getinge Assured

Reinigungs-Kontrollsysteme

Getinge Assured bietet Ihnen ein umfassendes Portfolio an Indikatoren, mit denen Sie die Wirksamkeit der Instrumentenaufbereitung überprüfen können.

Wash Monitor für Reinigungs- und Desinfektionsgeräte

Der Getinge Assured Wash Monitor ist ein synthetischer Prüftest zur Einmalverwendung für die routinemäßige Überwachung automatisierter Reinigungsvorgänge.

Die synthetische Testanschmutzung (Raute oder roter Balken) simuliert humanes Blut und Gewebe. Das Entfernen der roten Testanschmutzung bedeutet eine wirksame Reinigung.



Wash Monitor



Wash Monitor F/R
(Anwendung bei Hohlkörperinstrumenten)

Wash Monitor für Ultraschallgeräte

Der Getinge Assured Ultrasonic Wash Monitor ist ein synthetischer Prüftest zur Einmalverwendung für die routinemäßige Überwachung von Ultraschall-Reinigungsvorgängen.

Die synthetische Testanschmutzung (Raute oder blauer Balken) simuliert humanes Blut und Gewebe. Das Entfernen der blauen Testanschmutzung bedeutet eine wirksame Reinigung.



Wash Monitor Ultrasonic



Wash Monitor U/L
(Anwendung bei Hohlkörperinstrumenten)

Halter für Getinge Assured Wash Monitor und Getinge Assured Wash Monitor U

Der Test wird in einen Wash Monitor Holder eingesetzt und dann im jeweiligen Reiniger platziert. Dadurch wird ein kontaminiertes chirurgisches Instrument simuliert.

Der Halter für den Getinge Assured Wash Monitor und den Getinge Assured Wash Monitor U ist eine zusätzliche Vorrichtung für die routinemäßige Überwachung automatisierter Reinigungsvorgänge in Reinigungs- und Desinfektionsgeräten und Ultraschall-Reinigungsgeräten.



Halter Getinge Assured Wash Monitor R und F

Der Getinge Assured Wash Monitor R und F Holder ist eine zusätzliche Vorrichtung für die routinemäßige Überwachung automatisierter Reinigungsprozesse für Hohlkörperinstrumente in Reinigungs- und Desinfektionsgeräten sowie in Ultraschall-Reinigungsgeräten.



Bestellinformationen

Produkt	VE	Artikel-Nr.
Getinge Assured Wash Monitor	25 St.	503864500
Getinge Assured Wash Monitor	50 St.	503864600
Getinge Assured Wash Monitor	100 St.	503864700
Getinge Assured Wash Monitor Ultrasonic	50 St.	503865200
Getinge Assured Wash Monitor F/R	25 St.	6005500586
Getinge Assured Wash Monitor U/L	25 St.	6005500587
Getinge Assured Wash Monitor Holder		6005500585
Getinge Assured Wash Monitor F Holder		503865100
Getinge Assured Wash Monitor R Holder		503865000

Getinge Assured Protein Test

Schnelle Erkennung von Proteinrückständen

Der Getinge Assured Protein Test ist ein schneller und einfach durchzuführender Test zur Erkennung von Proteinrückständen auf chirurgischen Instrumenten, Reinigungsgeräten, Hohlkörper- und Lumeninstrumenten sowie flexiblen Endoskopen.



Getinge Assured Protein Test Instrumentenoberfläche

für solide Instrumente

Artikel-Nr.

Getinge Assured Protein Test *Oberflächen* enthält 50 Fläschchen mit Proteinnachweislösung und 50 Tupfer

503878500



Getinge Assured Protein Test Lumeninstrumente

für chirurgischen Hohlkörper und Lumeninstrumenten

Artikel-Nr.

Getinge Assured Protein Test *Lumen* enthält 50 Fläschchen mit Proteinnachweislösung und 50 Tupfer

503911200



Getinge Assured Protein Test – Flexible Endoscope 2,5 M

für flexible Endoskope

Artikel-Nr.

Der Getinge Assured Protein Test *Flexible Endoscope 2,5 M* enthält 20 Fläschchen mit Proteinnachweislösung und 20 Tupfer

2,5 M x 2.8 mm

503964400

2,5 M x 3.7 mm

6005500296

2,5 M x 1.9 mm

6005500297

Schneller Nachweis von Restprotein

- Dieser Test liefert eine semiquantitative Messung der Sauberkeit von Instrumenten.
- Der Proteintest kann Proteinrückstände mit einer Empfindlichkeit von 1 µg innerhalb von 10 Sekunden nachweisen.
- Bei Vorhandensein von Protein ändert sich die Farbe der Lösung von hellbraun in blau.
- Je höher die Kontaminierung mit Protein, desto dunkler und desto schneller ändert sich die Farbe in blau.
- Entspricht den Bestimmungen der Norm ISO 15883

Hersteller:

Getinge Infection Control AB • P.O. Box 69 • SE-305 05 Getinge • Sweden

Ihren lokalen Getinge-Vertriebspartner finden Sie unter der folgenden Adresse:

Getinge Deutschland GmbH • Kehler Str. 31 • 76437 Rastatt • Deutschland • +49 7222 932-0 • info.vertrieb@getinge.com

Getinge Österreich GmbH • Lemböckgasse 49 • 1230 Wien • Österreich • +43 1 8651487-0 • info-at@getinge.com

Getinge Schweiz AG • Quellenstrasse 41B • 4310 Rheinfelden • Schweiz • +41 61 836 47 70 • info@getinge.ch

www.getinge.de

GETINGE 