



Servo-u

– Kurzanleitung

Einrichtung

1. Das Netzkabel einstecken.
2. Die Klappe an der Seite öffnen und das Beatmungsgerät auf Position Ein stellen.
HINWEIS: Zum Einschalten des Servo-u muss zunächst der EIN/AUS-Schalter nach unten gezogen werden.
3. AIR- und Sauerstoffschläuche anschließen.
4. Räder am Wagen arretieren.
5. **VORKONTROLLE** starten. Anweisungen auf dem Bildschirm befolgen. (Während der Vorkontrolle wird der Testschlauch benötigt). Der Patientensystemtest ist in der Vorkontrolle enthalten.
6. **PATIENTENKATEGORIE** wählen: Erwachsene, Kinder oder Neugeborene (optional).
7. **BEATMUNGSTYP** wählen: invasiv oder nichtinvasiv (optional).
8. Das idealisierte Körpergewicht (predicted body weight, PBW) automatisch durch Antippen von **PBW** berechnen und das Geschlecht und die Größe der Patientin oder des Patienten eingeben. (Für die Patientenkategorie Kinder oder Neugeborene muss das Patientengewicht eingegeben werden). Das Tidalvolumen in ml/kg wird jetzt überwacht.
9. Schaltfläche **BEATMUNGSMODI** antippen. (Lange auf den Modus tippen, um weitere Informationen anzuzeigen).
10. Modus auswählen und Einstellungen anpassen.
11. Einige Einstellungen haben dynamische Bilder.
12. Die Sicherheitsskala kann durch Antippen von  erweitert werden.
13. Alarmgrenzen im Alarmfenster einstellen.
14. Auf **BEATMUNG STARTEN** tippen.

Weitere Informationen siehe Benutzerhandbuch

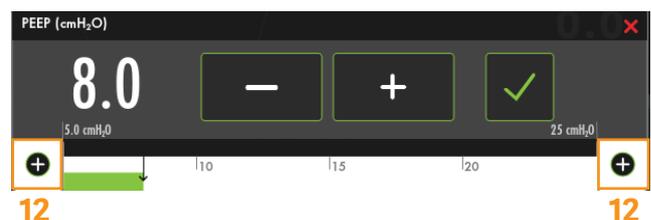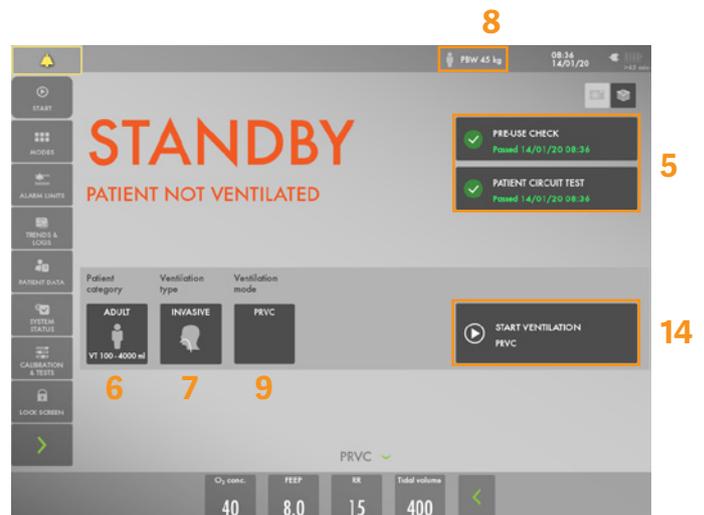

HINWEIS: Je nach Priorität werden Alarme in einer von drei Farben angezeigt:

- **Hohe Priorität**
- **Mittlere Priorität**
- **Niedrige Priorität**

 Alarmton pausiert – aktive Alarme können durch Antippen für zwei Minuten stummgeschaltet werden.

 Alarme vorab stummschalten – Antippen, wenn keine Alarme aktiv sind, um die meisten Alarme für zwei Minuten stummschalten.

Auf den aktiven Alarm tippen, um die Alarmgrenzen direkt einzustellen.



Schnellwahlmenü Statusleiste Numerische Werte



Leiste für den direkten Zugriff

Aktueller Messwert

Autoset-Alarmgrenzen – in kontrollierten Modi



Alarmlautstärke

Beatmung stoppen:

STANDBY lange gedrückt halten

Diskonnektieren

Manöver:

Open Lung Tool (optional), Verneblung, Statische Messungen, Manueller Atemzug, O₂-Flushniveau und Pes-Katheterpositionierung (optional)

Verschiedene Ansichten



Manufacturer · Maquet Critical Care AB · Röntgenvägen 2 SE-171 54 Solna · Sweden · +46 (0)10 335 00 00

hnen lokalen Getinge-Vertriebspartner finden Sie unter der folgenden Adresse:

Getinge Deutschland GmbH · Kehler Str. 31 · 76437 Rastatt · Deutschland · +49 7222 932-0 · info.vertrieb@getinge.com
 Getinge Österreich GmbH · Lemböckgasse 49 · 1230 Wien · Österreich · +43 1 8651487-0 · info-at@getinge.com
 Getinge Schweiz AG · Quellenstrasse 41b · 4310 Rheinfelden · Schweiz · +41 71 335 03 03 · info@getinge.ch

www.getinge.de

